

Aqvitox[®]-D

**ROZTOK
NA OŠETRENIE RÁN**
500 ml
rozprašovač

Aqvitox[®]
TECHNOLOGY

NÁVOD NA POUŽITIE

Aqvitox® - D roztok (500 ml, rozprašovač)

Názov zdravotníckej pomôcky: Aqvitox® - D roztok

Výrobca: Aqvitox Technology s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Trieda rizika zdravotníckej pomôcky: III

Určený účel použitia: Aqvitox® - D roztok je elektrolyzovaný čistiaci roztok určený na podporu hojenia rán a poranení. Mechanizmus účinku spočíva v obklade a mechanickom vyčistení rany a vo vytvorení vlhkého prostredia, ktoré je ďalej podporené znížením mikrobiálnej záťaže v rane. Prípravok svojím zložením neobsahuje živé organizmy, je určený pre slabú až stredne poškodenú kožu a nie je primárne určený na výplach.

Postup pri aplikácii: Ošetrovanie rán sa vykonáva opakovaným oplachom alebo obkladom roztokom Aqvitox® - D. Oplach sa vykonáva podľa potreby niekoľkokrát denne potrením postihnuteho miesta navlhčeným tampónom alebo priložením gázy navlhčenej v roztoku Aqvitox® - D, prípadne vlhku terapiou.

Nežiaduce účinky: Aqvitox® - D roztok je netoxický. Pri jeho používaní neboli zistené žiadne nežiaduce účinky, u ktorých by bola preukázaná spojitosť s aplikáciou výrobku. Pri kontakte s pokožkou nie je výrobok dráždivý. Pri zasiahnutí očí tiež nie je dráždivý, avšak u citlivých osôb je potrebný oplach tečúcou vodou. V prípade požitia menšieho množstva ako 1 dl nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia. U väčšieho množstva je treba vypláchnuť ústa pitnou vodou, vypíť aspoň 0,5 l vody a príslovať lekára.

Zloženie: Elektrolyzovaná voda, v nízkych koncentráciách kyselina chlórna, chlórnan sodný, chlórdioxid, chlorid sodný

Zvláštne podmienky pre skladovanie: Aqvitox® - D roztok skladujte v dobre uzatvorených obaloch, v suchom a vetranom prostredí, pri teplote 5 až 30 °C. Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a uchovávajte mimo dosah detí. Stabilita je zaistená do dátumu spotreby.

Dôležité upozornenia: Výrobok nebol testovaný na deťoch a na tehotných a kojacích ženách, preto je jeho použitie na tejto skupine pacientov možné iba po konzultácii s lekárom. Výrobok je kvapalný s možným slabým chlórovým zápachom. Riziko vyblednutia odevov. Výrobok je možné zlikvidovať nariadením vodou a spláchnuť do odpadu. Výrobok by sa nemal dostať do styku s kyselinami. Obal je možné po vypláchnutí recyklovať. Na predídanie vzniku alergickej reakcie nepoužívajte produkt v prípade precitlivosti na niektorú z obsiahnutých zložiek. V prípade zistenia nežiaducich účinkov je nutná konzultácia s lekárom. U výrobku nebola testovaná biokompatibilita pre dlhodobé použitie (t. j. nad 30 dní).

Dátum spotreby:

Číslo šarže:

Číslo verzie návodu na použitie: 4.1 SK

Dátum vydania poslednej revízie návodu na použitie: 15. 1. 2019



1023



8 588007 405018 >