

Aqvitox®-D

**GÉL
NA OŠETRENIE RÁN**
250 ml

Aqvitox
TECHNOLOGY

NÁVOD NA POUŽITIE Aqvitox® - D gél (250 ml)

Názov zdravotníckej pomôcky: Aqvitox® - D gél

Výrobca: Aqvitox Technology s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Trieda rizika zdravotníckej pomôcky: III

Určený účel použitia: Aqvitox® - D gél je elektrolyzovaný čistiaci gél určený na podporu hojenia rán a poranení. Mechanizmus účinku spočíva v oddelení rany od okolitého prostredia a v podpore vlhkého hojenia, ktorý je ďalej podporený znížením mikrobiálnej záťaže v rane. Prípravok svojím zložením neobsahuje živé organizmy, je určený pre slabo až stredne poškodenú kožu.

Postup pri aplikácii: Výrobok je nutné pred použitím pretrepať. V prípade aplikácie formou obkladu sa gél nanáša na postihnuté miesto v kombinácii s neadherentným krytím a prekryva sa savým obvazom. Gél je možné ponechať v rane až 24 hodín.

Nežiaduce účinky: Aqvitox® - D gél je netoxický. Pri jeho používaní neboli zistené žiadne nežiaduce účinky, u ktorých by bola preukázaná spojitosť s aplikáciou výrobku. Pri kontakte s pokožkou nie je výrobok dráždivý. Pri zasiahnutí očí tiež nie je dráždivý, avšak u citlivých osôb je potrebný oplach tečúcou vodou. V prípade požitia menšieho množstva ako 1 dl nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia. U väčšieho množstva je treba vypláchnuť ústa pitnou vodou, vypíť aspoň 0,5 l vody a privolať lekára.

Zloženie: Elektrolyzovaná voda, v nízkych koncentráciách kyselina chlórna, chlórnan sodný, chlórdioxid, chlorid sodný, kremičitan horečnato-litno-sodný.

Zvláštne podmienky pre skladovanie: Aqvitox® - D gél skladujte v dobre uzatvorených obaloch, v suchom a vetranom prostredí, pri teplote 5 až 30 °C. Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a uchovávajte mimo dosah detí. Stabilita je zaistená do dátumu spotreby.

Dôležité upozornenia: Výrobok nebol testovaný na deťoch a na tehotných a kojajúcich ženách, preto je jeho použitie na tejto skupine pacientov možné iba po konzultácii s lekárom. Výrobok je nutné pred použitím pretrepať. Riziko vyblednutia odevov. Výrobok je možné zlikvidovať nariadením vodou a spláchnutím do odpadu. Výrobok by sa nemal dostať do styku s kyselinami. Obal je možné po vypláchnutí recyklovať. Na predĺženie vzniku alergickej reakcie nepoužívajte produkt v prípade precitlivostenosti na niektorú z obsahovaných zložiek. V prípade zistenia nežiadúcich účinkov je nutná konzultácia s lekárom. U výrobku nebola testovaná biokompatibilita pre dlhodobé použitie (t. j. nad 30 dní).

Dátum spotreby:

Číslo šarže:

Číslo verzie návodu na použitie: 4.1 SK

Dátum vydania poslednej revízie návodu na použitie: 15. 1. 2019



8 588007 405032 >