

L-Mesitran Ointment obsahuje: 48 % lekársky med, lekársky hypoalergénny lanolín (MedilanR), slnečnicový olej, olej z trešče pečene, nechtík lekársky (Calendula Officinalis), alou (Aloe Barbadensis), vitamín C a E a oxid zinočnatý.

Keď je L-Mesitran v kontakte s ranou, z okolitých tkanív sa odvádza tekutina, čo vytvára vlhké prostredie podporujúce hojenie rany. To stimuluje proces hojenia rany tým, že uľahčuje autolýzu nekrotického a iného devitalizovaného materiálu, pomáha pri príprave spodiny rany a podporuje epitelizáciu.

L-Mesitran:

- má antibakteriálne vlastnosti.
- postupne sa stráca a dá sa ľahko odstrániť podľa miestneho protokolu na čistenie rán.
- bráni prítlnutiu sekundárneho krytia na spodinu rany.

Vzhľadom na použitie prírodných zložiek sa môžu jednotlivé šarže líšiť vo farbe (žltá – hnedá), viskozite a môžu obsahovať viditeľné kryštály cukru. Tieto odchýlky neovplyvnia účinnosť a použitie výrobku.

Indikácie

Povrchové a akútne rany, napr. rezné rany, odreniny a miesta transplantácie. Povrchové a čiastočne zhrubnuté popáleniny (1. a 2. stupňa). Chronické rany, napr. preležaniny, bercové, arteriálne a diabetické vredy. Rozširujúce sa rany (na podporu dezodorizácie a vyčistenia). Kolonizované akútne rany a (pooperačné) chirurgické rany.

Kontraindikácie a obmedzenia

Dosiaľ nie sú známe žiadne kontraindikácie. Nepoužívajte u pacientov, ktorí sú citliví na výrobok alebo na niektorú z jeho zložiek.

Preventívne opatrenia a pripomienky

1. Liečbu rany vždy konzultujte s lekárom.
2. Nepoužívajte nové výrobky, ktoré sú poškodené alebo preexspirované.
3. Skontrolujte a očistite ranu podľa miestneho protokolu.
4. V dôsledku autolytického vyčistenia sa môže zdať, že rana sa po prvej výmene krytia zväčšila. To je normálne a vyskytuje sa pri odstránení devitalizovaného tkaniva, pri príprave spodiny rany na hojenie.
5. V prípade neznášanlivosti výrobku L-Mesitran alebo jednej z jeho zložiek odstráňte výrobok vhodnými technikami a oblasť starostlivo očistite.
6. L-Mesitran je určený na použitie u jedného pacienta. Výrobok sa môže opätovne použiť len u toho istého pacienta.
7. Výrobok po použití vždy znova uzatvorte.
8. Po otvorení použite výrobok do troch mesiacov.
9. Výrobok zlikvidujte podľa miestneho protokolu.

Návod na použitie

A. Tuba: 1. Odstráňte vrchnák, vyčistite ústie tuby a vrchnú časť vrchnáka alkoholovým tampónom. 2. Zasuňte vrchnú časť vrchnáka do fóliového tesnenia, ktoré pokrýva špičku. Tubu teraz nestláčajte. B.

Nádoba: odstráňte tesnenie a vrchnák.

Aplikácia na ranu:

1. Pomocou sterilnej špachtličky naneste tenkú vrstvu výrobku L-Mesitran buď priamo na oblasť rany a okolité tkanivo alebo na sterilnú gázu. 2. Zakryte a zaistite vhodným sekundárnym krytím v závislosti od množstva tekutiny vytekajúcej z rany. 3. Ranu a okolité tkanivá pravidelne kontrolujte

podľa miestneho protokolu.

Frekvencia používania

To závisí od množstva exsudátu a od potrieb rany.

Výrobok aplikujte znova po jeho rozplynutí (\pm každých 24 – 48 hodín).

Opatrenia pri uchovávaní

Uchovávajte pri izbovej teplote medzi 5 °C a 25 °C (41 °F – 77 °F). Chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkosťou. L-Mesitran je prírodný produkt a pri vyššej teplote sa môže premeniť na kvapalinu. Ak sa predpokladá, že to bude problém, pred použitím umiestnite výrobok do chladničky.